



Parafuso de Interferência Arthrex

Técnica Cirúrgica



Usuários deste dispositivo são orientados a contatar seus representantes Arthrex locais se, em seu julgamento profissional, necessitarem de técnicas cirúrgicas mais específicas.

1. Posicione o pino guia da Arthrex na posição apropriada.
2. Insira a chave de fenda no parafuso e envolva a canulação hexagonal do parafuso, assegurando que esteja inteiramente assentado na canulação do parafuso.
3. Posicione o parafuso no pino guia e deslize-o para aposição apropriada.
4. Insira o parafuso.
5. Remova e descarte o pino guia.

CUIDADO: Danos à chave de fenda podem resultar em falha do assentamento completo do condutor no soquete do parafuso ou mau alinhamento entre a chave de fenda e o soquete de parafuso.

